

HELLER



MEDIZINTECHNIK

Elektromedizin

FFP2 Atemschutzmasken / Filterierende Halbmasken



**Persönliche Schutzausrüstung
der Kategorie III**

EU-Verordnung 2016/45

EN 149:2001 + A1:2009

ISO 9001:2015

CE 0194

**Material: Vliesstoff mit
Nasenbügel und Kopfbändern**

Filterleistung: $\geq 94\%$

Einzeln hygienisch verpackt

Prd-Nr.: GL001A

Art-Nr.: CSA-FFP2

Korrektes Aufsetzen der Atemschutzmaske

- ▶ Maske öffnen und Nasenclip leicht zusammenbiegen, um ihn vorzuformen.
- ▶ Maske mit Kopfbändern nach unten in die Hände nehmen.
- ▶ Maske zuerst über das Kinn, danach über die Nase ziehen.
- ▶ Fixierbänder hinter dem Kopf anbringen.
- ▶ Nasenclip mit beiden Zeigefingern andrücken.



Atenschutzmasken / Filtrierende Halbmasken FFP2

Einsatz

Filtrierende Halbmasken FFP2 gehören zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III und haben die Zweckbestimmung, den Träger vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen.

Eigenschaften

Die Atemschutzmaske ist gefaltet, für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ohne Ventil. Die FFP2-Maske filtert $\geq 94\%$ der in der Luft befindlichen Partikel. Damit bietet sie auch hohen Schutz vor einer Übertragung bzw. Ansteckung bei einer Tröpfchen-Infektion. Die ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und weichem Nasenkissen bietet hohen Tragekomfort. Die ummantelten Elastikbänder ermöglichen einen sicheren Sitz der Maske.

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG ist seit über 20 Jahren in der Medizintechnik tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Lösungen im Bereich der elektrischen Nerven- und Muskelstimulation.

Das innovative Unternehmen mit zentralem Sitz in Deutschland konzentriert sich im Besonderen auf kundenfreundlichen Service für Ärzte und Patienten mit technisch hochwertigen und bedienerfreundlichen Geräten zur Elektrostimulation. Das Leistungsspektrum umfasst Funktionelle Elektrostimulation (FES), TENS, EMS, Biofeedback und Inkontinenztherapie.



SPRO Medical Products (Xiamen) Co., Ltd.

No 139 Factory Building, TongAn GDN, TongAn Industrial Area, TongAn Xiamen, China

CE 0194

Vertrieb durch:

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG

Europaplatz 2

35619 Braunfels

