

HELLER



MEDIZINTECHNIK

Elektromedizin

FFP2 Atemschutzmasken / Filterierende Halbmasken



Persönliche Schutzausrüstung
der Kategorie III

EU-Verordnung 2016/425

EN 149:2001 + A1:2009

ISO 9001:2015

CE 0194

Material: Vliesstoff mit
Nasenbügel und Kopfbändern

Filterleistung: $\geq 94\%$

Einzeln hygienisch verpackt

Prd-Nr.: GL001A

Art-Nr.: CSA-FFP2

Korrektes Aufsetzen der Atemschutzmaske

- ▶ Maske öffnen und Nasenclip leicht zusammenbiegen, um ihn vorzuformen.
- ▶ Maske mit Kopfbändern nach unten in die Hände nehmen.
- ▶ Maske zuerst über das Kinn, danach über die Nase ziehen.
- ▶ Fixierbänder hinter dem Kopf anbringen.
- ▶ Nasenclip mit beiden Zeigefingern andrücken.



Atenschutzmasken / Filtrierende Halbmasken FFP2

Einsatz
Filtrierende Halbmasken FFP2 gehören zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III und haben die Zweckbestimmung, den Träger vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen zu schützen.

Eigenschaften
Die Atemschutzmaske ist gefaltet, für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ohne Ventil. Die FFP2-Maske filtert $\geq 94\%$ der in der Luft befindlichen Partikel. Damit bietet sie auch hohen Schutz vor einer Übertragung bzw. Ansteckung bei einer Tröpfchen-Infektion. Die ergonomische Passform mit einstellbarem Nasenbügel und weichem Nasenkissen bietet hohen Tragekomfort. Die ummantelten Elastikbänder ermöglichen einen sicheren Sitz der Maske.

EU-Konformitätserklärung: www.heller-medizintechnik.de/download/GL001A-Konf


Gebrauchsanweisung: www.heller-medizintechnik.de/download/GL001A-Anleitung

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG ist seit über 20 Jahren in der Medizintechnik tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Lösungen im Bereich der elektrischen Nerven- und Muskelstimulation. Das innovative Unternehmen mit zentralem Sitz in Deutschland konzentriert sich im Besonderen auf kundenfreundlichen Service für Ärzte und Patienten mit technisch hochwertigen und bedienerfreundlichen Geräten zur Elektrostimulation. Das Leistungsspektrum umfasst Funktionelle Elektrostimulation (FES), TENS, EMS, Biofeedback und Inkontinenztherapie.



CE 0194

 SPRO Medical Products (Xiamen) Co., Ltd.
No 139 Factory Building, TongAn GDN, TongAn Industrial Area, TongAn Xiamen, China
Vertrieb durch:
HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG
Europaplatz 2
35619 Braunfels



Import durch:
BODY PRODUCTS RELAX Pharma und
Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1-3
50226 Frechen

MFD: 05/2020
MHD: 04/2023