

HELLER



MEDIZINTECHNIK

Elektromedizin

Mund-Nasen-Schutz (MNS)



Medizinprodukt Klasse I gem.
93/42/EWG

EN 14683:2019 (Type II)

EN ISO 9001:2015

EN ISO 13485:2016

Material: 3-lagig, aus Polypropylen
(nicht gewebt), frei von Latex und
Glasfaser

50 Stk. in einer Spenderbox

Art-Nr.: HMT-CSA-MNS

Hersteller-Nr. 703056-b

Korrektes Aufsetzen des medizinischen Mund-Nasen-Schutzes

- ▶ Maske leicht auffächern und Nasenclip zusammenbiegen, um ihn vorzuformen.
- ▶ Maske in beide Hände nehmen, dabei die Daumen durch die Fixierbänder führen.
- ▶ Mit dem Kinn in die Maske einsteigen, danach über die Nase ziehen.
- ▶ Gummibänder hinter den Ohren fixieren.
- ▶ Nasenclip mit beiden Zeigefingern andrücken.
- ▶ Maske bei Bedarf weiter auffächern, so dass Mund und Nase vollständig bedeckt sind.



Medizinischer Mund-Nasen-Schutz

Einsatz

Der medizinische Mund-Nasen-Schutz (kurz MNS) dient dazu, den Auswurf von Tröpfchen beim Ausatmen und Sprechen zu verhindern bzw. verringern. Zweckbestimmung ist damit in erster Linie der Fremdschutz. Ein MNS kann jedoch auch die Mund- und Nasenpartie des Trägers vor einem direktem Auftreffen größerer Tröpfchen schützen.

Eigenschaften

Der medizinische Mundschutz ist aus hochwertigem, 3-lagigen Vliesstoff gefertigt und an den Rändern gestanzt, so dass die Maske sehr strapazierfähig ist. Durch den eingearbeiteten Nasenbügel und die elastischen Fixierbänder bietet er außerdem einen hohen Tragekomfort.

EU-Konformitätserklärung: www.heller-medizintechnik.de/download/703056b-Konf

Gebrauchsanweisung: www.heller-medizintechnik.de/download/703056b-Anleitung

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG

HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG ist seit über 20 Jahren in der Medizintechnik tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in der Gestaltung von Lösungen im Bereich der elektrischen Nerven- und Muskelstimulation. Das innovative Unternehmen mit zentralem Sitz in Deutschland konzentriert sich im Besonderen auf kundenfreundlichen Service für Ärzte und Patienten mit technisch hochwertigen und bedienerfreundlichen Geräten zur Elektrostimulation. Das Leistungsspektrum umfasst Funktionelle Elektrostimulation (FES), TENS, EMS, Biofeedback und Inkontinenztherapie.



 BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1 - 3, 50226 Frechen

Vertrieb durch:
HELLER MEDIZINTECHNIK GmbH & Co. KG
Europaplatz 2
35619 Braunfels



MFD: 09/2020
MHD: 08/2025